



キュアファイン マスク

# Curefine mask


PFE  
捕集効果  
**99.4%**  
2層のフィルターを  
セットした状態

ヤマシンナノフィルタ®  
+  
除菌銅布フィルター付  
3Dコットンマスク

普段使いからアスリート、外で仕事の現場まで

スポーツ用3Dコットンマスク(本体)にナノファイバー製フィルターと高除菌銅布フィルターの2層のフィルターを組み合わせることで3重の防御を実現しました。マスクにセットした状態でPFE試験で99.4%のPFE捕集効果があり、0.1μmの試験粒子径をカットできます。更にスポーツに特化した銅繊維を織り込んだ1層の除菌銅布フィルターもセットにしていますので、あらゆる場面で使う事ができます。マスク本体内側のポケットにインナー用フィルターを収納する構造なのでマスク本体を洗う際やフィルターの交換も簡単です。

※マスクは、感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

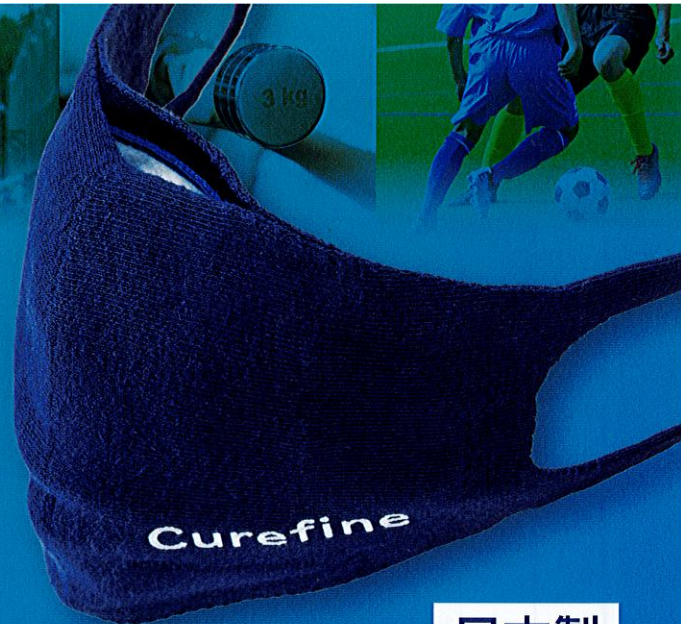

日本製

PFE試験(新潟県工業技術総合研究所測定)

通勤・通学・外で仕事をする方・スポーツに  
2つのフィルターとマスクの組み合わせで  
様々な場面で使う事ができます



ヤマシンナノフィルタ®+  
除菌銅布フィルター(一体型)  
or  
除菌銅布フィルター

スポーツ用  
3Dコットンマスク  
(2層編み)

セット内容:S~LL

2層  
フィルター

お仕事、学校、外出時、  
高地トレーニング想定用に使用


## ナノフィルタ (ヤマシンナノフィルタ®) + 除菌銅布フィルター(一体型)

日常生活ではナノファイバー製フィルターにより、0.1 μmの微粒子を99%カット。特定用途有りで最高レベルのマスク※に相当する捕集力を実現するナノフィルタと多くの抗ウイルスを不活化する(一社)日本銅センターのCuSTAR認証取得した銅繊維を織り込んだフィルターの2重構造であらゆる場面に最適です。

※最高レベルのマスクは、JIST9001の医療マスク基準及び一般マスクの性能基準のクラスII~IIIのPFE捕集効率98%以上の基準に基づく。

### ヤマシンナノフィルタ® 特許

●ヤマシンナノフィルタ®は登録商標です。また、ヤマシンナノフィルタ®は特許技術です。ナノフィルタの繊維径は最小0.2μmです。

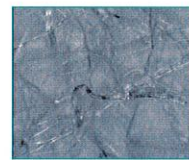


拡大(200倍)

+

### 除菌銅布フィルター 特許

- 高い除菌力を持つ銅糸ファイバーを繊維に織り込むことにより、銅の力によりウイルスをブロックします。
- 微量静電気力でウイルスをフィルター外側に付着させ、フィルターを通過させません。
- マスクの目詰まりを防ぎ、呼吸が楽です。
- 高い消臭効果により、口臭の気になる方にも安心。
- マスクによる肌荒れを防止します。

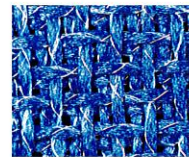


拡大(30倍)

1層  
フィルター

スポーツなど身体を動かす場面で使用

## 除菌銅布フィルター (スポーツ用)

スポーツ時には2層フィルターでも使われている銅繊維を織り込んだ1層のフィルターをご使用ください。1層フィルターでも多くのウイルスを不活性化します。装着中も息苦しくなりにくく快適に過ごす事ができます。

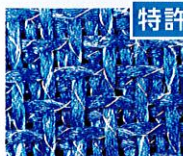

拡大(30倍)

マスク  
本体

3D立体構造により鼻元からあご先までカバー

## スポーツ用3Dコットンマスク(2層編み)

### 3Dコットン

- 肌に優しく、汗をかいたり汚れた際に洗いやすいコットン製。
- フィルターは内側のポケットに装着し、簡単に外せるので、汗をかいても本体は絞ってまた使用できます。
- 柔らかな素材で耳が痛くなりやすい。

# 使用方法



マスク本体のポケットにインナー用フィルターを入れます。フィルターはポケットに簡単に収納することができます。



ポケット入口を上にして耳ひもをかけます。隙間が開かないようにしっかりと装着してください。



インナー用フィルターの交換は簡単なので外出先でご使用の場面に合わせてすぐに交換できます。



## 3Dコットンマスク

手洗いはもちろんのこと、マスク用の洗濯ネットに入れば洗濯機でも洗う事ができます。その後乾いたらハンカチを敷いて、スチームアイロンで軽く整えてください。顔にフィットします。

## インナー用フィルター

フィルター2種類とも漬け置き押し洗いで中性洗剤を使用して下さい(塩素系漂白剤は、使用禁止です)。洗った後、ナノフィルタは熱に弱いので自然乾燥させてください(アイロン禁止)。洗濯ではナノフィルタは5回程度でPFE補集効率97%です。

寒い冬の時期に肌触りよい温かいマスクをお使いください

寝るときにも温かいマスクでお過ごしください

# キュアファイン マスク Curefine mask

[ ナノフィルタ + 除菌銅布フィルター付3Dコットンマスク ]

- サイズ/S(子供用)、M・L・LL(大人用)
- 3Dコットンマスクのカラーバリエーション/  
ホワイト、グレー、ネイビー、ワインレッド

日本製

## セット内容



コットンマスク1枚



ナノフィルタ  
(ヤマシナノフィルタ®)  
+ 除菌銅布フィルタ




除菌銅布フィルタ  
(スポーツ用)

フィルターの大きさ	S(子供用)	M・L・LL
	タテ70×ヨコ90mm	タテ85×ヨコ115mm

マスクの寸法表(伸縮率15%)

		H	W
S	子供用	12.5cm	13.5cm
M	男女兼用	13cm	15cm
L	男女兼用	14cm	17cm
LL	男女兼用	15.5cm	18cm

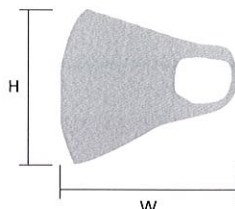

■材質/コットンマスク:コットン80%・PU20%、除菌銅布フィルター:銅繊維・ポリエステル、ヤマシナノフィルタ:ポリプロピレン



ホワイト グレー ネイビー ワインレッド

チーム・  
団体ロゴ入れ  
カラーに  
ついては  
ご相談ください



コデラカプロン株式会社

■工場・営業事務所 / 〒955-0053 新潟県三条市北入蔵2-2-46  
■本社 / 〒955-0051 新潟県三条市鶴田1丁目6番9号

TEL. 0256-39-6898 受付時間 / 平日8:30~17:00  
FAX. 0256-39-6885

HPは  
コチラ



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

コデラカプロン株式会社は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています